

Podnośniki podwieszane

Rozwiązania w podnośnikach sufitowych



LUNA
5
LAT
GWARANCJI



WINCARE
P o l s k a

Podnośnik sufitowy Luna / Szyny / Systemy Mobile Flex / Wieszaki / Wagi
Nowość! Luna Mover (Napęd elektryczny) i Wieszak elektryczny



Spis treści

- 4 Podnośnik sufitowy Luna
- 6 Modele Luny
- 8 Główne cechy Luny
- 10 Pilot i ładowarka
- 11 Wózek
- 12 Szyny
- 16 Sprzęgła
- 17 Mobile Flex
- 18 Luna Mover **NOWOŚĆ!**
- 20 Wieszaki
- 21 Wieszak elektryczny **NOWOŚĆ!**
- 22 Wagi

W tym katalogu przedstawiamy naszą szeroką gamę rozwiązań sufitowych wraz z akcesoriami.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat oferowanych produktów lub więcej danych technicznych, to prosimy o kontakt:

Tel.: [+48 606 347 288](tel:+48606347288)

E-mail: artro.med@gmail.com

Web: www.artro-med.pl



Luna podnośnik podwieszany

i prowadnice sufitowe



Stosowane na całym świecie

Stosowane w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych. Sufitowe rozwiązania Ergolet rewolucjonizują opiekę zdrowotną osób starszych i niepełnosprawnych.



Dostęp do każdego miejsca w pokoju

Nasze sufitowe systemy podnoszenia działają z lekkim podnośnikiem Luna, który jest łatwy w instalacji oraz może być montowany w całym pomieszczeniu, nawet przy nierównych ścianach.



Wychodzimy naprzeciw potrzebom

Podnośnik Luna i innowacyjny system prowadnic jest połączeniem funkcjonalności i estetyki, co czyni go idealnym wyborem, który potrafi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta w coraz szybciej rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej.



LUNA
5
LAT
GWARANCJI

Jesteśmy całkowicie przekonani o niezawodności wykonania i bezawaryjnej obsługi Luny im dlatego, też możemy zaoferować naszym Klientom

produkt o 5-letniej gwarancji

Bezpieczeństwo i zaufanie



TRYB
stały
200 lub 275 kg
udźwigu

TRYB
przenośny
200 lub 275 kg
udźwigu

Modele Luny

Stale i przenośne monitorowane w jednym i tym samym podnośniku, co jest prawdziwie unikalną cechą. Zmiana trybu Luny przenośnego w stały i odwrotnie, może być wykonana w przeciagu kilku sekund, poprzez zdjęcie i odwrócenie urządzenia do szyny, bez użycia narzędzi.



Luna Twin

- jako rozwiązanie bariatryczne

400 kg
udźwigu

Luna Twin - do 400 kg udźwigu

- *Elastyczne rozwiązanie: Dwa podnośniki, każdy o udźwigu 275 kg, mogą być złączone w podnośnik bariatryczny o udźwigu 400 kg w zaledwie kilka minut. Żadne narzędzia nie są potrzebne.*
- *Zwycięzca przetargu: Wyłoniony przez Duńskie Władze Regionu Centralnego, przy projekcie budowy największego szpitala w północnej Europie.*



Pojedyncza
Luna Twin
275 kg



- Zamocuj łącznik dystansowy między jednostkami
- Zamocuj Luny na szynie i upewnij się, że paski są równej długości.
- Podłącz przewód do jednostki.

1



- Przymocuj poprzeczkę dystansową do pasów.
- Jeśli trzeba, dostosuj wysokość paska przyciskając na pilocie "prawo", "lewo"

2



- Przymocuj wieszak za pomocą szybkozłączki
- I teraz jest już rozwiązanie bariatryczne - prosto i szybko!

3

Dwie Luny
Twin 400 kg

2 Luny w 1 Lunie Twin!

Jak zwiększyć udźwig Luny z 275 kg do 400 kg bez użycia narzędzi!



i Charakterystyka

- *Udźwig 200, 275, 400 kg*
- *Sama Luna waży zaledwie 6,7 kg (bez wieszaka)*
- *Funkcja miękkiego startu i stopu*
- *Dwie ręczki do zamontowania podnośnika*
- *System bezpiecznego zamykania z alarmem*
- *Wózek z pompowanymi kołami, które są cichsze od np. kół nylonowych*
- *Powierzchnie łatwe do czyszczenia*
- *Prosta i szybka w obsłudze – zajmuje ona tylko kilka minut!*
- *Wszystkie funkcje mogą być sterowane za pomocą pilota (więcej informacji – str.10)*





Luna pilot i ładowarka

IPx4 złącze śrubowe:
pewny i bezpieczny
mechanizm łączący
pilota z Luną.
Dostępny także w
klasie IPx7.



Ładowanie
ciągłe



Pilot posiada
przyciski (nie
membranę)
i elastyczny
zaczep

Zeskanuj kod QR
i oglądaj filmy,
kartę produktu,
instrukcję



- Ergonomiczny kształt pilota i wyjątkowa funkcjonalność
- Ładowarka do Luni może być montowana na każdym typie ściany. Zapewnia to stałe i stabilne stanowisko ładowania
- Ładowarka do Luni może być także montowana na innych produktach Ergolet, takich jak
- Wózek do Luni czy też Mobile Flex 2- lub 4-kolumnowy.
- Luna jest ładowana poprzez pilota (ze wskaźnikiem ładowania)
- Wszystkie funkcje mogą być sterowane za pomocą pilota –także przycisk awaryjny ‘stop’

Wózek Luna

Wózek do przewozu podnośnika Luna

Używanie podnośnika sufitowego Luna w module przenośnym pozwala na nieporównywalną z niczym elastyczność w sytuacjach transportowania pacjenta, zarówno w domach opieki jak i w środowisku opieki domowej.

Wózek Luna jest szybkim, wydajnym oraz praktycznym środkiem transportowania przenośnej kasety z jednego pomieszczenia do drugiego. Przy użyciu Wózka Luna, opiekun nie musi przenosić kasety w rękę z pomieszczenia do pomieszczenia. Gładko jeżdżący Wózek Luna wykonuje pracę za opiekuna.


Wózek Luna zapewnia opiekunowi pełne przenośne rozwiązanie: pomost, który bezpiecznie utrzymuje wyciąg sufitowy Luna w miejscu, wygodne ładowanie na stacji bazowej, kieszeń na pas Luny, oraz przydatny futerał do przenoszenia podwieszek i innych akcesoriów. Krótko mówiąc, jest to praktyczna pomoc do perfekcyjnego transportu urządzenia.




Szyny

System oszynowania do Luny: szeroki wachlarz elastycznych, mocnych i łatwych do zainstalowania szyn. WinnCare zapewnia szeroki wybór szyn aby dostosować się do różnych i wymagających potrzeb dzisiejszego sektora opieki. Wszystkie szyny są zrobione z proszkowo powlekanego aluminium o przedłużonej trwałości.


- Niski profil szyny 75 mm, mały i mocny, o małej wysokości, optymalne odległości przęsta i łatwość instalacji.
- Szyna 103 mm jest niezależną szyną używaną głównie przy szynach trawersowych, ale również przy systemach wymagających połączenia niskiej wysokości i długiego przęsta.
- Lekka szyna 135 mm skrywa swoją siłę. Ta szyna ma największą rozpiętość ze wszystkich szyn przeznaczonych do Luny i może być używana jako szyna trawersowa razem z unikatowym sprzęgiem. Z uwagi na swoją gładką powierzchnię oraz krawędzie, szyna 135 mm jest łatwa do czyszczenia.



75 mm
szyna



103 mm
szyna




135 mm
szyna



Szyna C

Elastyczność jest główną zaletą szyny C.

Szyna C wykorzystuje ten sam kanał - aby zmieścić zarówno wózek jak i mocowania do ściany i, kiedy nie jest używany, ten kanał może być zakryty za pomocą zaśleпки zmieniający szynę C w całkowicie zakryty, dyskretny panel ścienny. W dodatku, szyna C ma wąskie żłobienia na spodzie, praktyczną funkcję do zawieszenia lekkich półek na książki, obrazków lub innych dekoracji ściennych bez wiercenia dziur czy też wbijania gwoździ w ścianę.

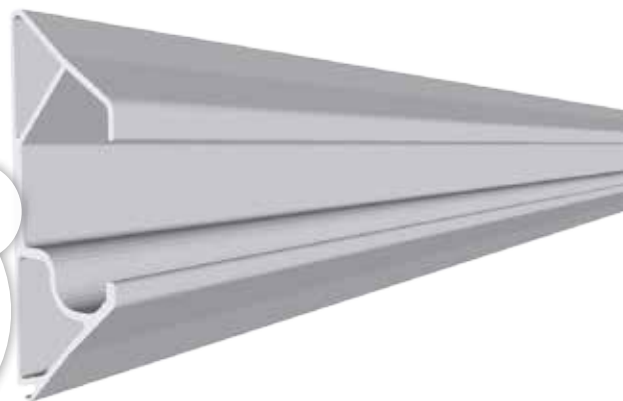

Szyna E

Szyna E o głębokości tylko 25 mm

jest atrakcyjnym płaskim panelem ściennym

oraz dyskretną i nierzucającą się w oczy alternatywą dla nieestetycznych listew ściennych i sufitowych, które są stosowane tradycyjnie. Szyna E wtapia się w estetyczny sposób w pokój i może być montowana do każdego rodzaju ściany. Ponadto, szyna E jest prosta i szybka do montażu, a tym samym opłacalna i preferowana w instalacjach zarówno w prywatnych domach jak i instytucjach. Szyna E jest także wyjątkowo giętka. Na przykład, w pokoju mogą być zainstalowane szyna E i system trawersowy, ale w przypadku, gdy system trawersowy nie jest używany lub jest potrzebny w innym pokoju, to wtedy trawers może być łatwo i szybko zdemontowany z profili szyny E i dogodnie przeniesiony w przeciagu kilku minut.



Szyna zabudowana

Nowość! Najnowszą wersją szyny z całej dostępnej gamy jest szyna wbudowana o profilu 75 mm.

Profil szyny wbudowanej jest montowany równo z sufitem.

Ten elegancki profil jest często wybieranym rozwiązaniem przez architektów przy specyficznych wnętrzach – zarówno dla pojedynczej szyny jak i systemów H.





Szeroki wybór prowadnic sufitowych

Ergolet oferuje szeroką gamę systemów sufitowych, szyny proste i zakrzywione, obrotnice i zmieniające tor, które mogą być łatwo zainstalowane w różnych konfiguracjach, po to, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie do indywidualnej sytuacji.

Unikalne szyny montowane na ścianach

Unikalne szyny ściennie E i C dopasowują się dyskretnie do środowiska opieki i zmieniają sposób pracy opiekuna. Jest to elegancka alternatywa dla konwencjonalnych wsporników ściennych i sufitowych.

Zwizualizujemy to dla Ciebie

Nasz doświadczony zespół inżynierów może stworzyć wizualizację systemu podsufitowego na papierze lub w formie animacji, aby zobrazować rozwiązania w danym projekcie.



Przykłady systemów szyn ściennych i sufitowych



Sprzęgła

Jeśli trzeba przetransportować pacjenta z pokoju do pokoju lub też z pokoju do łazienki, nasze sprzęgło jest prostym i niezawodnym rozwiązaniem, które także zmniejsza liczbę wymaganych podniesień. Mniejsza liczba podniesień oznacza większy komfort pracy dla opiekuna i bezpieczniejszy transport dla pacjenta.

Architekci jak i przedsiębiorcy budowlani wybierają sprzęgła do Luny tak jak i mocowania do ścian ze względu na ich eleganckie i kompaktowe wzornictwo. Sprzęgło pasuje do szerokości większości ścian (min. 300 mm). I dlatego też, że sprzęgło jest montowane bardzo blisko powierzchni ściany zajmując niewiele miejsca w pokoju, przez co obszar pomieszczenia jest optymalnie wykorzystany.

Sprzęgło jest bardzo krótkie porównując inne dostępne rozwiązania na rynku i z uwagi na to, że jest obsługiwane manualnie, nie wymaga dodatkowych kosztownych zmian w instalacji elektrycznej budynku. Zamykanie i otwieranie sprzęgła jest bardzo proste, gdyż wystarczy tylko pociągnąć za sznurek. Kiedy sprzęgło jest otwarte i trawers jest w jednej osi z mechanizmem, system zamyka się automatycznie i jest gotowy do transferu między pokojami. Aby odblokować sprzęgło – pociągnąć za sznurek.



Mobile Flex

Urządzenie przeznaczone dla osób, które wymagają natychmiastowego lub tymczasowego systemu podnoszenia, który może być łatwo regulowany i prosty w użyciu i demontażu. Mobile Flex jest łatwy w montażu i nie wymaga dodatkowych narzędzi podczas regulacji wysokości i szerokości dla zapewnienia sobie indywidualnego i komfortowego rozwiązania.

Dopasowanie odpowiedniej wysokości poprzez sprężynę gazową zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do użycia. Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji.

Mobile Flex w połączeniu z innowacyjnym rozwiązaniem podnośnika podwieszanego Luna jest prostym i funkcjonalnym systemem podnoszenia, stanowiącym idealny wybór zarówno dla osób prywatnych jak i instytucji.

Rama jezdna Mobile Flex zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg, wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika podwieszanego Luna.

Wybieraj, przebieraj

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ramy 2-kolumnowej nad łóżkiem, czy też ramy 4-kolumnowej z dostępem do każdego miejsca w pokoju, Mobile Flex jest tak uniwersalnym rozwiązaniem, które dzięki swojej modułowej budowie sprosta Twoim potrzebom.



System
2 kolumnowy
Regulowana wysokość
i szerokość

Złożenie zajmuje
tylko 30 min



System
4 kolumnowy
Pełna regulacja, dostęp do
każdego miejsca w pokoju,
wolnostojący

Złożenie zajmuje
tylko 1 godzinę



NOWOŚĆ!

Luna Mover

- z napędem elektrycznym



Luna Mover

Max. obciążenie (SWL) 275 kg
Funkcja łagodnego startu i stopu
Większa niezależność pacjenta



Luna Mover montowana na szynie



Opatentowana, zintegrowana pozwala także na przemieszczanie ręczne



Łatwy montaż podnośnika sufitowego Luna



Pilot ze strzałkami pokazującymi kierunek przemieszczania się



Nowa Luna

Innowacyjny podnośnik sufitowy Luna, który z dumą możemy teraz zaprezentować w wersji Luna Mover, charakteryzuje się duńskim designem i znakomitą funkcjonalnością.

Luna Mover jest także pomocna w sytuacjach, gdy opiekun chce zatrzymać podnośnik sufitowy Luna w określonym momencie lub kiedy opiekun, z jakichś powodów, potrzebuje pomocy napędu aby przesunąć pacjenta wzdłuż szyny.

W domach opieki Luna Mover daje pacjentom korzyść w postaci zwiększonej niezależności. Np. kiedy pacjent jest w stanie sam założyć podwieszkę, to może także dzięki funkcjom na pilocie przemieścić się np. z łóżka na krzesło.

Luna Mover jest zasilana i kontrolowana poprzez podnośnik sufitowy Luna, a to oznacza, że nie potrzebne są dodatkowe kable do ładowania. Jest to proste połączenie dwóch urządzeń dołączonym kablem zasilającym. Luna Mover jest wyposażona w opatentowany system bezpieczeństwa który, jeśli to potrzebne może być odblokowany poprzez użycie zintegrowanego uchwytu. Po odblokowaniu, Luna Mover może być ręcznie przesuwana po szynie.

Luna Mover jest stworzona aby spełnić te same wysokie standardy funkcjonalności i designu co nasza klasyczna Luna IPx4 i dlatego przyznaje jej się również unikatową 5-letnią gwarancję.

Wieszaki

Szeroki wybór wieszaków w różnych rozmiarach oraz modelach, które można dopasować do różnych potrzeb i sytuacji transferowych. Wszystkie wieszaki są wyposażone w opatentowany system haków do podwieszek.

Wieszak dwupunktowy jest najlepszym rozwiązaniem do standardowego transferu. Jest on dostępny w trzech szerokościach.

W sytuacjach, gdy pacjent ma specjalne potrzeby, możemy zastosować unikatowy wieszak trzypunktowy w kształcie litery V, który zwiększa odległość pomiędzy pasami na ramiona a pasami na nogi, a tym samym czyni podwieszkę bardziej otwartą dla wygodniejszego podnoszenia.

W innych sytuacjach, np. dla pacjentów bariatrycznych, możemy także zastosować jeden z naszych wieszaków 4-punktowych. Mamy 2 typy tego rodzaju wieszaków.

Największym jest wieszak o kształcie litery H z 4 punktami zawieszenia w takiej samej odległości lub można też wybrać bardziej elastyczny model, czyli można użyć wieszaka 2-punktowego i dodać do niego 2 dodatkowe wieszaki boczne na te 2 punkty.

W ten sposób otrzymamy elastyczny wieszak 4-punktowy po to, żeby dopasować do różnych szerokości ramion i bioder.

Używając wieszaków 3 lub 4-punktowych, otrzymujemy rozwiązanie bardziej przestronnego i elastycznego transferu, które warto wziąć pod uwagę przy specjalnych potrzebach pacjenta.

Główne cechy produktu

Szeroki wybór wieszaków do użytku standardowego jak i specjalnych potrzeb. Opatentowany system haków do podwieszek łatwo wymienne wieszaki do wielu zastosowań. Można stosować zarówno do podnośników podłogowych jak i sufitowych.



NOWOŚĆ!

Wieszak elektryczny

Nowy, jedyny w swoim rodzaju wieszak elektryczny do podnośników sufitowych.

Wieszak elektryczny może obracać się o 360° bez wkręcenia lub zaplątania paska lub przewodów.

Udźwig: 275 kg



Wszeczhstronne rozwiązanie!

Wieszak elektryczny daje wiele możliwości i zapewnia pełną elastyczność w zmianie pozycji pacjenta od niemal pozycji leżącej do pozycji siedzącej bez konieczności zmiany wieszaka.

Wieszak ten pomaga ustawić pozycję pacjenta na krześle w przemieszczaniu z łóżka na krzesło.

W tym samym czasie, wieszak elektryczny daje możliwość zapewnienia właściwego kąta dla pacjenta podczas transferu, tak aby uwzględnić potrzeby pacjenta. Taki wieszak daje także opiekunowi dobrą możliwość kontaktu wzrokowego z pacjentem. Wieszak elektryczny musi być używany ze specjalnym rodzajem podwieszek z zaciskami.



Wagi

Wagi te są wagami M (wagami zatwierdzonymi medycznie). Zostały one zaprojektowane aby zważyć niepełnosprawnego pacjenta, podczas kiedy jest on w podwieszce.

Udźwig wagi to 300 kg i jest ona używana z podnośnikami sufitowymi Luna 200 i 275 kg. Wagi mają dokładność do 0,1 kg.

Wagi mają zarówno duży wyświetlacz jak i różnorodne funkcje takie jak: **On/Off/Zero/Tara** oraz przycisk **'Hold'**.

Funkcja **'Hold'** umożliwia zapamiętanie od 5 do 10 odczytów co umożliwia analizowanie rozbieżności.

Funkcja **'Tara'** umożliwia odjęcie dodatkowej wagi jak ubranie od wagi całkowitej.

Możemy także zaoferować wagę o udźwigu 400 kg dla podnośnika bariatrycznego Luna Twin.



Waga do podnośnika sufitowego Luna



Waga z podwójnym wieszakiem



Waga z podwójnym wieszakiem

Podwójny wieszak jest idealnym rozwiązaniem jeśli szukasz uniwersalnego i przenośnego rozwiązania, które pasowałoby do podnośników podłogowych jak i sufitowych różnych producentów.

W dodatku, łatwość użycia paska mocującego i wspornika/klamry z regulacją szerokości, która dostosowuje się do różnych wielkości wieszaków.



Udźwig do 300 kg

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jeżeli masz pytania o jeden lub więcej produktów z tej broszury lub chciałbyś się dowiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach związanych z przemieszczaniem pacjentów, higieną, łóżkami, materacami lub poduszkami przeciwoleżynowymi, prosimy skontaktuj się z nami:

Tel.: +48 606 347 288

E-mail: artro.med@gmail.com

Web: www.artro-med.pl

Czekamy na kontakt od Ciebie!

